



# Инструкция


**Внимание:** Перед взятием образца прополощите рот теплой водой. Осуществляйте забор по прошествии часа после принятия пищи, питья и чистки зубов

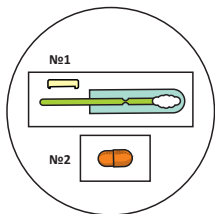


В набор входит:  
№1 щеточка с пробиркой  
и крышечкой  
№2 силикагель капсула

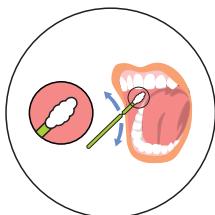


Поместите щеточку в рот  
и потрите внутреннюю  
часть щеки, прилагая  
некоторое усилие не  
менее 30 секунд

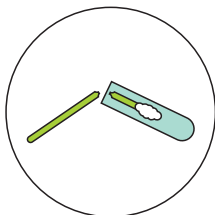

Поместите щеточку в  
пробирку и надломите  
ее по линии разрыва.

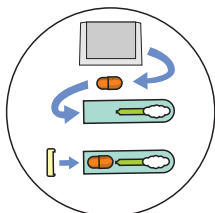

Извлеките силикагель капсулу  
из упаковки и поместите ее в  
пробирку с щеточкой. Плотно  
закройте крышкой пробирку.

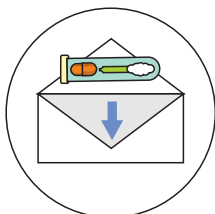


Положите пробирку  
в конверт.  
Отправьте конверт  
в лабораторию.

**Примечание:** Если при вскрытии упаковки, капсула оказалась окрашена в зеленый цвет, это означает что она не подходит для использования.



# Қолдану бойынша нұсқау


**Назар аудар:** Үлгіні қолдану алдында аузыңызды жылы сумен шайыңыз. Үлгіңіздің дуалын алу үшін тамақтанғаннан кейін, сусын ішкен соң және тіс тазалағаннан кейін шамада бір сағат өткеннен кейін жүзеге асырыңыз.

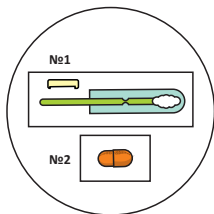


Жиынға кіреді:

№1 Түтігі бар шөтке мен қақпақ


№2 Силикагельді капсула

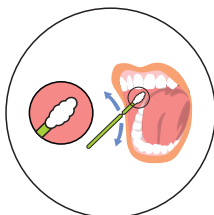


Шөткені ауыз қуысына апарып, ішкі жағынан күш сала 30 секунд үйкелеңіз

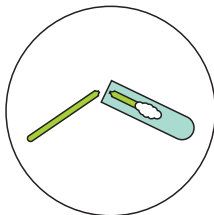

Шөткені қайтадан түтікке салып, үзілудің сызығы бойынша үлкен саусақпен баса отырып сындырыңыз

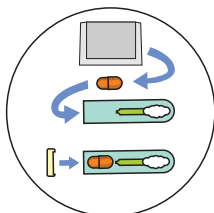

Силикагельді капсуланы алымынан алып, щеткасы бар түтікке салыңыз. Түтіктің қақпағы тығыз жабылғанын қадағалаңыз.

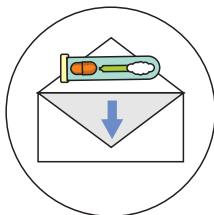

Түтікті хат қалтаға салып, зертханаға жіберіңіз.

**Ескерту:** Егер орамды ашқан кезде жасыл түсті болғаның байқасаңыз, оның жарамсыз екенін білдіреді.

